

MICROSWABS

Souches de Contrôle Qualité certifiées ATCC

Micro-organismes lyophilisés en pilule



- SIMPLE & RAPIDE** ● Utilisation sous forme d'écouvillon
● Régénération en seul geste.
- PRATIQUE** ● Deux souches unitaires dans conditionnement blister.
- PERFORMANT** ● Chaque préparation a suivi au maximum 4 passages à partir de la culture de référence.
- COMPLET** ● Près de 300 souches disponibles, garanties d'origine ATCC.
- SECURISÉ** ● Transport sécurisé grâce à l'emballage norme UN3373.
● Régénération sécurisée grâce à un embout sécable.

Les Microswabs sont des produits MECCONTI distribués par



Mode opératoire des **MICROSWABS**

RÉGÉNÉRATION ^(1 & 2)

- Ôtez l'écouvillon de son emballage.
- Pliez l'embout rouge à 45°.
- Pressez doucement l'embout jusqu'à ce que le liquide de réhydratation humidifie la pastille lyophilisée.
- Secouez doucement jusqu'à ce que la suspension soit homogène.

INOCULATION ⁽³⁾

- Inoculez le milieu de culture obtenu avec le coton tige.



(1)



(2)



(3)



*Découvrez l'ensemble
de nos réactifs dans
notre catalogue i2a*