

PROCHECK

Contrôle de décontamination de surface

Les indicateurs ProCheck sont utilisés pour les contrôles d'efficacité de nettoyage de toutes sortes de surfaces. Ils permettent de contrôler la propreté, en testant la présence de protéines résiduelles. Les indicateurs ProCheck ne dépendent pas de la présence d'ATP.



- Très simple d'utilisation : il vous suffit d'ouvrir l'emballage au niveau de la perforation
- Tenir le bâtonnet d'un côté et enlever l'emballage de l'autre
- Passer fermement sur la surface à contrôler avec l'indicateur ProCheck apparent (test 1)
- Remettre le bâtonnet dans son emballage
- Enlever l'autre côté de l'emballage pour effectuer le second test

Note : Après ouverture, les 2 indicateurs doivent être utilisés dans l'heure qui suit.

Interprétation des résultats :

S'il y a présence d'impuretés, le bâtonnet change de couleur. Pour une contamination en protéines de plus de 20 µg, la couleur vire au vert clair, et si cela dépasse les 150 µg la couleur vire au vert foncé. L'intensité de la contamination peut être déterminée grâce à la comparaison de la couleur avec l'échelle ci-dessus.

Stockage : Nous recommandons de stocker les produits entre 4°C et 24°C.

ProCheck est un produit MECCONTI distribué par



i2a ■ BP90002 ■ Parc de la Méditerranée ■ 34477 Pérols Cedex ■ France
Tél. 33 4 67 50 48 05 ■ Fax. 33 4 67 17 09 06 ■ e-mail : contact-commercial@i2a.info



www.i2a.info